

Concquer-suihke suun limakalvoille

Lääkinnällinen laite

Auttaa suojaamaan ja uudistamaan suunielun kuivia, kirveleviä ja ärtyneitä limakalvoja.

- ✓ Suojaa limakalvoja ja lievittää ärsytystä
- ✓ Kosteuttaa tehokkaasti
- ✓ Raikastaa hengityksen

Sisältää Propolsave®-seosta, jossa on propolista ja viikunaopuntiaa.

- ✓ ALKOHOLITON
- ✓ GLUTTEENITON
- ✓ Ei sisällä bentsalkoniumkloridia
- ✓ 30 ml e

Concquer®
oral

Käyttöaiheet: Concquer-suihke suun limakalvoille ehkäisee ja hoitaa suunielun limakalvojen ärtyneisyyttä seuraavissa tapauksissa:

- ärsyttävä tai bakteeri- tai virusinfektion jälkeinen yskä
- vilustumisen tai influenssan oireet
- suun kuivuus ja kirvely
- suukirurgian jälkeen
- kemoterapian tai sädehoidon aikana.

Annotus: 2–3 suihkausta korkeintaan 5 kertaa päivässä. Hoitoa jatketaan, kunnes oireet häviävät, korkeintaan 3–4 viikon ajan. Yli 30 päivän käytöstä on keskusteltava lääkärin kanssa. Mieto mintun maku antaa miellyttävän raikkaan tunteen.


Koostumus: natriumhyaluronaaatti, Propolsave®, E-vitamiini, makeutusaineet (sukraloosi ja asesulfaami K), Aloe Vera -geeli, tislattu kamomillavesi, sinkkiglukonaatti, minttuaromi, polysorbaatti 20, sitruunahappo, säilöntäaineet (natriumbensoaatti ja kaliumsorbaatti), vesi.

Varoitukset ja varotoimet:

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä tai allerginen jollekin sen ainesosalle.
- Pese kädet ennen tuotteen käyttöä.
- Jos tuote aiheuttaa yliherkkyyttä tai haittavaikutuksia, lopeta käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä.
- Jos olet raskaana tai imetät, kysy neuvoa lääkäriltä.
- Ei lasten ulottuville.
- Ei saa antaa alle 3-vuotiaille lapsille.
- Jos tuotetta säilytetään alla olevien ohjeiden mukaisesti, sitä voi käyttää 12 kuukauden ajan avaamisen jälkeen.
- On suositeltavaa pitää Concquer-suihke suun limakalvoille henkilökohtaisessa käytössä.
- Älä käytä vaurioituneille limakalvoille.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä tuotetta, jos sen pakkaus on vahingoittunut.

Säilytys: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa etäällä lämmönlähteistä ja suojassa auringonvalolta.

Käyttöohjeet:

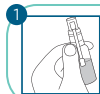

1 Käännä pulloa ja aseta suutin kuvan mukaisesti. Poista suuttimen korkki.



2 Käännä suutinta varovasti 90 astetta.



3 Aseta suutin suuonteloon, suihkauta Concquer-suihketta 2–3 kertaa painamalla suuttimen painiketta. Suuntaa suihkaukset suun limakalvoille. Käytön jälkeen käännä suutin pystyasentoon.



4 Vältä syömistä, juomista ja suuontelon huuhtelemista käytön jälkeen 30 minuutin ajan.

Concquer spray för munsllemhinnan

Medicinteknisk produkt

Hjälper till att skydda och återställa munhålets slemhinna vid torrhet, sveda och irritation.

- ✓ Skydd och lindring vid irritation
- ✓ Effektivt fuktgivande
- ✓ Fräsch andedräkt

Innehåller Propolsave®, en speciell blandning av Propolis och Opuntia ficus-indica.

- ✓ ALKOHOLFRI
- ✓ GLUTENFRI
- ✓ Fri från bensalkoniumklorid
- ✓ 30 ml e

Concquer®
oral

Användning: Concquer spray för munsllemhinnan förebygger och behandlar irriterad slemhinna i mun och svalg vid:

- irriterande hosta eller hosta efter en bakteriell- eller virusinfektion
- törret och sveda i munnen
- förkylnings- eller influensasyntom
- efter kirurgi i munnen
- behandling med cellgifter och strålbehandling.

Dosering: 2-3 spraydoser upp till 5 gånger om dagen.

Behandlingen bör fortgå tills symptomen försvinner, upp till ca 3-4 veckor. Användning i mer än 30 dagar bör konsulteras med läkare. Lätt smaksatt med mint för en uppfriskande känsla.


Innehållsämnen: natriumhyaluronat; Propolsave®, vitamin E, sötningsmedel (sukralos och acesulfamkalium), Aloe Vera gel, destillerat kamomilvatten, zinkglukonat, mintsmaak, polysorbat 20, citronsyra, konserveringsmedel (natriumbensoat och kaliumsorbat), vatten.

Varningar och föreskrifter:

- Använd inte vid överkänslighet eller vid allergi mot något innehållsämne.
- Om produkten är förvarad enligt föreskrifterna nedan kan produkten användas inom 12 månader efter öppnandet.
- Tvätta händerna före applicering.
- Vi rekommenderar personlig användning av Concquer spray.
- Vid intolerans eller andra biverkningar, avsluta behandlingen och kontakta läkare.
- Använd inte om du får sår på slemhinnan.
- Vid graviditet eller amning bör läkare konsulteras.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte om förpackningen är skadad.
- Ej till barn under 3 år.

Förvaring: Förvaras på en sval och torr plats, i skydd från värmekällor och solljus.

Bruksanvisning:

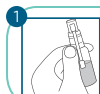

1 Vänd flaskan för att placera applikatorn enligt bilden på förpackningen. Byt ut locket mot applikatorn.



2 Vrid försiktigt applikatorn 90 grader.



3 Placera applikatorn i munnen och spraya Concquer spray 2-3 gånger genom att trycka på applikatorns lock. Rikta applikatorn mot munhålets slemhinna. Efter användning, vrid applikatorn i vertikalt läge.



4 Inom 30 minuter efter applicering, undvik att äta, dricka eller skölja munnen.

Tillverkare: Ekuberg Pharma surl, via Tito Schipa, 6-73020 Carpignano Salentino (LE)-Italien
Exklusiv distributör: ACCORD Healthcare Oy, Oksasenkatu 10 A 6, 00100 Helsingfors, Finland
Textens senaste uppdatering: 23.10.2020

BBBB0397
FCS-0020

CE 1370
Medicinteknisk
produkt